


SUGAR TONG® Splint

RORACO hat's!
Ihr Spezialist für Notfallmedizin

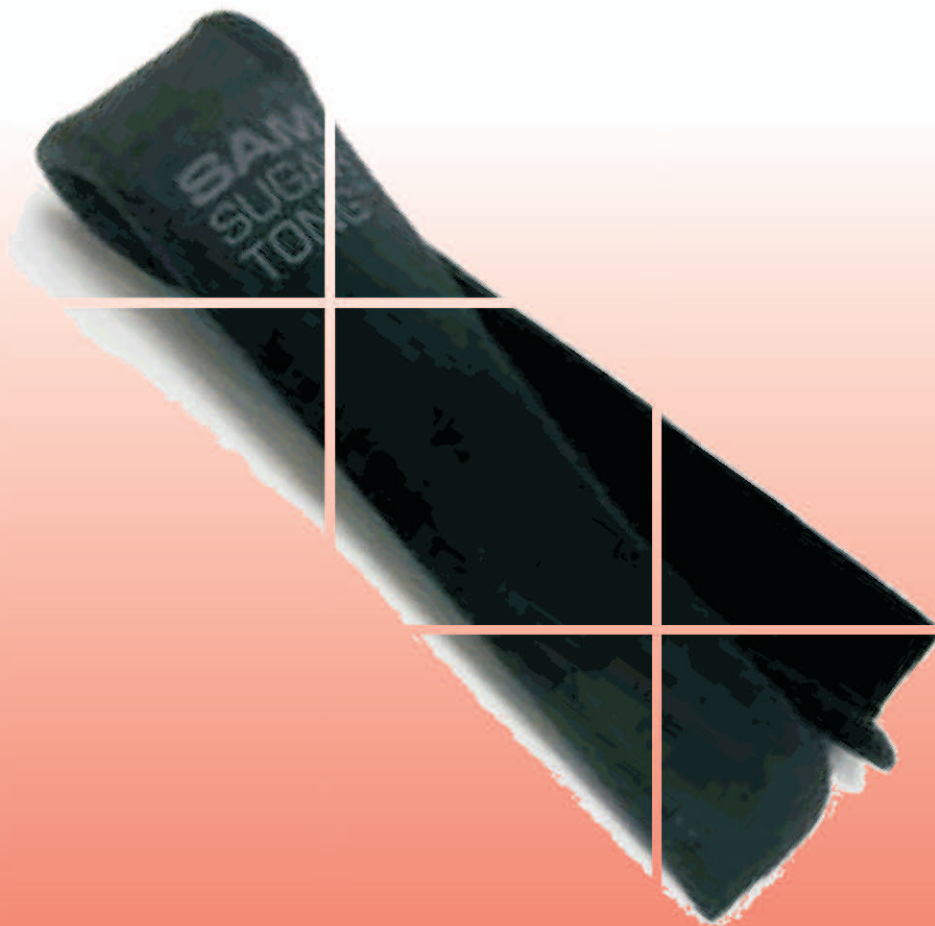

Schnelle Applikation - Formbar
Komfortabel - Wiederverwendbar

RORACO Ges.m.b.H., A-1030 Markhofgasse 19
www.roraco.at, verkauf@roraco.at, Tel.: +43 (1) 310 58 68



Ihr Spezialist für Notfallmedizin

In Minuten angelegt ohne Wasser oder Handschuhe

Die **Sam Sugar Tong®** bietet eine vorläufige Immobilisation bei akuten Handgelenks- oder Unterarmfrakturen sowie Immobilisation nach chirurgischen Eingriffen. Dieses Produkt begrenzt die Flexion, Extension und Rotation des Handgelenks und ist in weniger als einer Minute angebracht, ohne dass man Wasser oder Handschuhe benutzen muss.

Die weiche Wattierung sorgt für eine optimale Belüftung und Komfort und kann leicht wieder abgenommen, umgeformt und wieder angebracht werden. Die Handgelenkschiene ist sehr leicht, strahlendurchlässig und waschbar.

SAM SUGAR TONG®

Einfache und komfortable Immobilisation für akute Unterarm- und Handgelenksfrakturen





SAM SUGAR TONG® zeichnet sich, wie Sam Splint, durch seine Festigkeit und Verformbarkeit aus, besitzt jedoch eine weiche Schlinge als Zwischenstück zu Verbindung der Seitenteile. In Verbindung mit der neuen Soft Shell Oberfläche wird dadurch ein Tragekomfort für den Patienten erreicht, der den Einsatz des **SAM SUGAR TONG®** als langfristige Immobilisation von Handgelenks- und Unterarmfrakturen ermöglicht.

Artikelnummer: s 0069

Die schnelle und einfache Lösung!

Gebrauchsanweisung

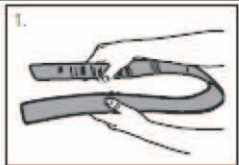		<ol style="list-style-type: none"> 1. Falten Sie SAM SUGAR TONG® wie abgebildet mit der Schrift nach außen. 2. Das markierte X an der Außenseite platzieren Sie am Ellenbogen. 3. Richten Sie das Ende des oberen Teiles des SAM SUGAR TONG® mit den Knöcheln des Handgelenks aus, lassen Sie ihn nicht über den Knöcheln hinaus stehen. 4. Formen Sie eine C-Curve an der oberen und unteren Hälfte. 5. Benutzen Sie dementsprechend der Vorgabe Ihren rechten oder linken Arm als Form um Anpassungen vorzunehmen. 6. Polstern Sie Knöchelne Erhebungen bevor Sie den SAM SUGAR TONG® anlegen. 7. Legen Sie die Schiene nun dem Patienten an und führen sie die letzten feinen Anpassungen bis zu einem optimalen Sitz durch. 8. Umwickeln Sie jetzt die Schiene lt. Abbildung mit einem Verband Ihrer Wahl, wir empfehlen jedoch zu dieser Anwendung den Snögg Elasto-Quick® Verband.
